



FUTURO™ SUPPORTO PER GOMITO

45975

 **SUPPORTO
MODERATO**



**MATERIALE
TRASPIRANTE**



**ASSORBIMENTO
DELL'UMIDITÀ**

Fornisce una pressione mirata in caso di dolore all'avambraccio.


IDEALE PER:

Gomito del tennista, tendinite
movimenti ripetitivi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Il cuscinetto applica una pressione delicata e mirata sul tendine dell'avambraccio.
- 2 Fascia regolabile per un adattamento personalizzato.

TAGLIA:

Codice Prodotto	CM	
45975	17.8-35.6	

Misurare la circonferenza dell'avambraccio sotto il gomito.

COME INDOSSARLO:



Far passare la chiusura a strappo attraverso l'occhiello, mantenendo il cuscinetto a contatto con il braccio.



Con la chiusura rivolta verso l'esterno, posizionare il cuscinetto sotto il gomito in direzione dell'avambraccio esterno.



Stringere il cinturino fino a quando è aderente e fermo ma confortevole.

Destinazione d'uso: Per supportare gomiti e avambracci rigidi, deboli o lesionati.

Composition: Polyurethane, Nylon, Acetal, Polyester.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Piofello MI
www.3mitalia.it/futuro

3M