



FUTURO™ TENNISKYYNÄRPÄÄNAUHA

45975

 KESKITASON
TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI



KOSTEUTTA
SIIRTÄVÄ

Luo kohdistettua painetta
kynärvarren kipukohtiin.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Tenniskynärpään ja jännetulehduksen
hoitoon, toistuviin liikkeisiin

OMINAISUUDET:

- ① Pehmustetyyny kohdistaa hellävaraista painetta kynärvarren jänteisiin.
- ② Tuki on helppo säätää istuvaksi.

KOKO:

Tuotekoodi	CM
45975	17.8-35.6

Kynärvarren ympärysmitta kyynärpään vierestä.



TUEN ASETTAMINEN:



Vedä kiinnike soljen läpi niin että
pehmustetyyny on ihoa vasten.



Kun kiinnike osoittaa ulospäin, aseta
pehmustetyyny kyynärpään alta
kynärvarren ulkopintaa kohti.



Kiristä hihnaa kunnes se asettuu lujasti
mutta mukavasti.

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen kyynärpään ja kynärvarren tukeminen.

Koostumus: polyuretaani, naiton, asetaali, polyesteri.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESP00

3M