



FUTURO™ DELUXE DAUMEN-SCHIENE

45843DABI, 45844DABI



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken und Daumen.

Zusammensetzung: Nylon, Polyurethan, Polyester, PVC-Wildleder, Elasthan, POM, Rayon, Stahl.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

**Stabilisierung und Unterstützung
bei schmerzenden, schwachen oder
verletzten Daumen.**

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Alltägliche Aktivitäten, Arbeiten am
Computer, Gaming

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Zwei verstärkte Stabilisatoren zur Unterstützung des Daumens.
 - 2 Komfortables Daumenteil.
 - 3 Einfaches Schnürsystem zum Anbringen und Einstellen in einem Schritt.
- Niedriges Profil für freie Beweglichkeit der restlichen Finger.


GRÖSSE:



Artikelnummer	Größe	PHC	CM
45843DABI	S/M	6134351	12.7-16.5
45844DABI	L/XL	6134345	16.5-20.3

Umfang des Handgelenks messen.

TRAGEANWEISUNG:

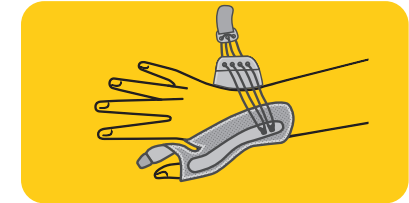

Öffnen Sie den Klettverschluss an der Handgelenk- und der Daumen-Bandage. Stecken Sie die Hand in die Bandage und führen Sie den Daumen in das Daumenloch.



Führen Sie die Handgelenk-Bandage um das Handgelenk und schließen Sie sie unter dem Handgelenk. Stellen Sie die Klettverschlüsse so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.



Legen Sie das Daumenband um den Daumen. Sie können das Band auch über den Daumenballen führen, um diesen zusätzlich zu stabilisieren.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

