



# FUTURO™ ESTABILIZADOR DELUXE DEL DEDO PULGAR

45843, 45844

 **SOPORTE  
MODERADO**



**MATERIAL  
TRANSPIRABLE**

Uso previsto: Proporciona sujeción a muñecas y pulgares rígidos, débiles o lesionados.

Composición: Nylon, Polyurethane, Polyester, PVC Suede, Elastane, POM, Rayon, Steel.  
Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.  
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

**Ayuda a estabilizar y proporciona sujeción a pulgares doloridos, débiles o lesionados.**

## IDEAL PARA:

Soporte general, caminar, correr, ejercicio, senderismo

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 Dos estabilizadores reforzados que ayudan a sujetar el dedo pulgar .
  - 2 Cómoda funda para el pulgar.
  - 3 Sencillo sistema de cordones que facilita su colocación y ajuste en un solo paso.
- El perfil bajo permite el libre movimiento de los dedos.


## TOMAR LA MEDIDA:



CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
170847.2	S/M	12.7-16.5
170848.9	L/XL	16.5-20.3

Medir el contorno de la muñeca.


## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

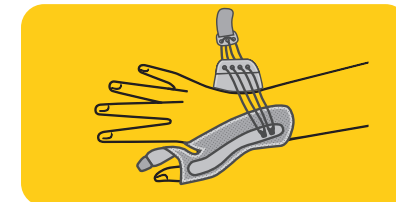

Abra el enganche de la correa de la muñeca y de la correa del pulgar. Introduzca la mano en la muñequera y el pulgar en el orificio correspondiente.



Envuelva la muñeca con la correa y fíjela en la base de la muñeca. Ajuste hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.

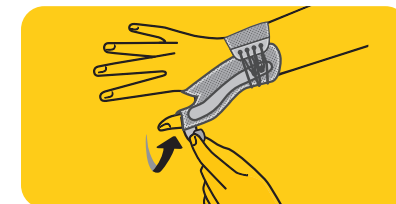

Rodee el pulgar con la correa y fíje esta para un mejor ajuste o rodee la base del pulgar para una mayor estabilidad.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

**3M**