



FUTURO™ STABILIZZATORE PER POLLICE DELUXE

45843, 45844

 **SUPPORTO
MODERATO**



Destinazione d'uso: Per supportare polsi e pollici rigidi, deboli o lesionati.
Composition: Nylon, Polyurethane, Polyester, PVC Suede, Elastane, POM, Rayon, Steel. Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico. I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionist sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti. 3M and FUTURO are trademarks of 3M.



**MATERIALE
TRASPIRANTE**

**Stabilizza e supporta pollici deboli,
dolenti o lesionati.**

IDEALE PER:

Attività quotidiane, invio di SMS, giochi

**CARATTERISTICHE
DEL PRODOTTO:**

- 1 I due stabilizzatori rinforzati aiutano a supportare il pollice .
 - 2 Comodo alloggiamento per il pollice.
 - 3 Sistema di allacciamento semplice per l'applicazione e la regolazione in un'unica azione.
- Grazie al profilo basso è possibile muovere liberamente le altre dita.


TAGLIA:



Codice Prodotto	Taglia	Inches	CM
45843	S/M	5.0-6.5	12.7-16.5
45844	L/XL	6.5-8.0	16.5-20.3

Misurare la circonferenza del polso.

COME INDOSSARLO:

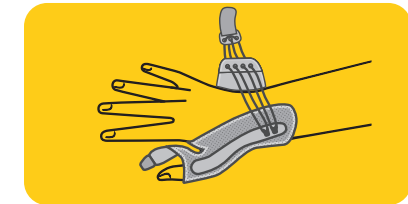

Aprire la fascia a strappo del polso e quella del pollice. Far scorrere la mano nel tutore e il pollice nell'apposito foro.



Avvolgere la fascia del polso intorno ad esso fino a fissarla alla sua base. Regolare per ottenere una vestibilità salda, ma comoda.



Avvolgere e fissare la fascia attorno al pollice per una migliore vestibilità o lungo la base del pollice per una maggiore stabilità.

3M Office
Via N. Bobbio 21
20096 Piofello MI
www.3mitalia.it/futuro

3M