



FUTURO™

ΠΕΡΙΚΑΡΠΙΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ ΜΑΥΡΟΣ

45843, 45844



ΑΝΑΠΝΕΟΝ
ΥΛΙΚΟ

Προβλεπόμενη χρήση: Για στήριξη σε δύσκαμπτο, αδύναμο ή τραυματισμένο καρπό και αντίχειρα.

Σύνθεση: Nylon, Polyurethane, Polyester, PVC Suede, Elastane, POM, Rayon, Steel.

Αν προκληθούν, επιμένουν ή επιδεινωθούν οι ενοχλήσεις ή ο πόνος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

Τα 3M και FUTURO είναι εμπορικά σήματα της 3M.

Σταθεροποιεί και στηρίζει τον καταπονημένο, αδύναμο ή τραυματισμένο αντίχειρα.

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Καθημερινές δραστηριότητες, δακτυλογραφηση, παιχνίδια σε υπολογιστή (gaming)

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:

- 1 Δύο ενισχυμένα στηρίγματα, που βοηθούν στη στήριξη του αντίχειρα.
 - 2 Άνετη υποδοχή αντίχειρα.
 - 3 Εύκολο σύστημα ιμάντων για εφαρμογή και ρύθμιση σε ένα βήμα.
- Χαμηλό προφίλ, για την ελεύθερη κίνηση των υπόλοιπων δακτύλων.


ΜΕΓΕΘΗ:



Κωδικός Αναφοράς	Μέγεθος	Ύψος	Εκατοστά
45843	S/M	5.0-6.5	12.7-16.5
45844	L/XL	6.5-8.0	16.5-20.3

Μετρήστε γύρω από τον καρπό.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ:

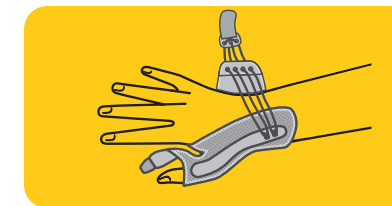

Ανοίξτε τον ιμάντα στερέωσης του καρπού και του αντίχειρα. Περάστε το χέρι μέσα στον νάρθηκα και τον αντίχειρα στο άνοιγμα για τον αντίχειρα.



Τυλίξτε τον ιμάντα του καρπού γύρω από τον καρπό και στερεώστε τον στη βάση του καρπού. Ρυθμίστε μέχρι να αισθανθείτε ότι η εφαρμογή είναι σταθερή, αλλά και άνετη.



Τυλίξτε και στερεώστε τον ιμάντα του αντίχειρα γύρω από τον αντίχειρα για καλύτερη εφαρμογή ή γύρω από τη βάση του αντίχειρα για πρόσθετη σταθεροποίηση.

3M Ελλάς ΜΕΠΕ
Λεωφόρος Κηφισίας 20
15125, Μαρούσι, Αθήνα
www.3M.gr

