



# FUTURO™ ATELLE DE POUCE DELUXE

45843, 45844



**MATÉRIAU  
RESPIRANT**

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet ou un pouce raide, faible ou blessé.

Composition: Nylon, Polyurethane, Polyester, PVC Suede, Elastane, POM, Rayon, Steel.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

**Stabilise et soutient un pouce raide,  
douloureux ou blessé.**

## INDIQUÉ POUR:

Support de base post-chirurgical

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Deux stabilisateurs renforcés soutiennent le pouce.
  - 2 Attelle confortable pour le pouce.
  - 3 Système de laçage facile et mise en place rapide et ajustée.
- Le profil bas de l'attelle permet le libre mouvement des doigts restants.


## TAILLES:



Category Number	Size	Inches	cm
45843	S/M	5.0-6.5	12.7-16.5
45844	L/XL	6.5-8.0	16.5-20.3

Mesurer le tour du poignet.

## MODE D'EMPLOI:

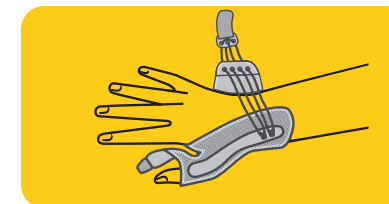

Ouvrez le système à boucles et à crochets ainsi que la dragonne. Faites glisser la main dans l'orthèse et le pouce dans le trou prévu à cet effet.



Enroulez la sangle de poignet autour du poignet et fixez-la à la base de ce dernier. Réglez jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.



Enroulez et fixez la sangle autour du pouce pour un meilleur ajustement, ou le long de la base du pouce pour plus de stabilité.

3M France  
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public  
Boulevard de l'Oise  
95006 Cergy-Pontoise Cedex  
542 078 555 RCS Pontoise

