



FUTURO™ DELUXE STABILOIVA PEUKALOTUKI

45843, 45844



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen ranteen ja peukalon tukeminen

Koostumus: nailon, polyuretaani, polyesteri, PVC-mokkanahka, elastaani, POM, viskoosi, teräs.
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Stabiloi ja tukee kipeää, heikkoa tai vahingoittunutta peukaloa.

KÄYTTÖTARKOITUS:

Arkiaskareisiin, puhelimen käyttöön, pelaamiseen

OMINAISUUDET:

- 1 Kaksi vahvistettua vakauttajaa auttavat tukemaan peukaloa.
 - 2 Miellyttävä peukalohihna.
 - 3 Yksivaiheinen nauhajärjestelmä tekee asettamisesta ja säädöstä helppoa.
- Matala profiili mahdollistaa muiden sormien vapaan liikkumisen.


KOKO:



Tuotekoodi	Koko	CM
45843	S/M	12.7-16.5
45844	L/XL	16.5-20.3

Ranteen ympäröimistä.

TUEN ASETTAMINEN:

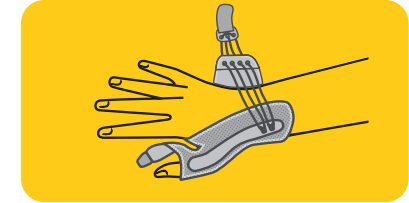

Avaa tarranauhakiinnike ja peukalohihna. Liu'uta käsi tuen sisään ja aseta peukalo peukaloaukkoon.



Kiedo rannetuki ranteen ympäri ja kiinnitä kiinnike ranteen tyven kohdalle. Säädä, kunnes se asettuu tukevasti mutta mukavasti.



Kiedo ja kiinnitä peukalohihna peukalon ympäri istuvuuden parantamiseksi.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 ESPOO

