



FUTURO™ DELUXE DUIMSPALK

45843, 45844



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols en duim.

Samenstelling: Nylon, Polyurethaan, Polyester, PVC Suede, Elastaan, POM, Rayon, Staal.
Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.
3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Stabiliseert en ondersteunt pijnlijke, zwakke of geblesseerde duimen.

IDEAAL VOOR:

Dagelijkse activiteiten, sms'en, gamen

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Twee versterkte stabilisators helpen om de duim te ondersteunen .
 - 2 Comfortabele duimhouder.
 - 3 Gemakkelijk aan te trekken en te verstellen door handig sluitsysteem.
- Lage uitsnijding zodat de overige vingers ongehinderd kunnen bewegen.


MAAT:



Referentie	CNK	Maat	CM
45843	3050010	S/M	12.7-16.5
45844	3050002	L/XL	16.5-20.3

Meet de omtrek van de pols.

DRAAGINSTRUCTIES:

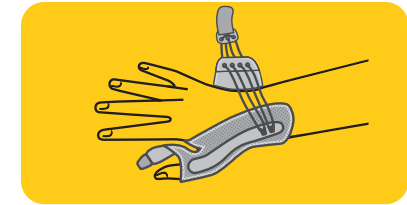

Open het klittenband van de pols- en duimriem. Schuif de hand in de brace en de duim in het duimgat.



Wikkel de polsriem om de pols en maak hem bij de polsbasis vast. Verstel de brace totdat hij strak maar comfortabel aanvoelt.



Wikkel en bevestig de duimriem rondom de duim voor een betere pasvorm, of rondom de duimbasis voor extra stabiliteit.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

