



# FUTURO™ DELUXE TOMMELSTABILISATOR MED SNØRE

45843-44



ÅNDBART  
MATERIALE

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stiv, svag eller skadet håndled og tommelfinger.

Materialesammensætning: Nylon, Polyuretan, Polyester, PVC ruskind, Elastan, POM, Rayon, Stål.

Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

Stabiliserer og støtter øm, svag eller skadet tommelfinger.

## VELEGNET TIL:

Hverdagsaktiviteter, sms-skrivning, computerspil

## NØGLEFUNKTIONER:

- 1 To forstærkede stabilisatorer giver støtte til tommelfingeren.
  - 2 Komfortabel tommelfingermanschet.
  - 3 Brugervenligt snøresystem for påsætning og justering i ét trin.
- Lavprofilen muliggør fri bevægelse af de andre fingre.

## STØRRELSESVALG:



Varenr	Størrelse	CM
215945	S/M	12.7-16.5
215946	L/XL	16.5-20.3

Mål rundt om håndledet.

## SÅDAN BRUGES DEN:



Åbn krog og løkke-håndledsstroppen og tommelfingerstroppen. Før hånden ind i skinnen og tommelfingeren ind i tommelfingerhullet.



Vikl håndledsstroppen omkring håndledet, og fastgør den ved håndroden. Juster, indtil den føles fast, men stadig behagelig.



Vikl og fastgør tommelfingerstroppen omkring tommelfingeren for at forbedre pasformen, eller langs tommelfingerens nederste del for at øge stabiliteten.

3M a/s  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Denmark

3M