



FUTURO™ DAUMEN-SCHIENE

45841DABI, 45842DABI

 MITTLERER
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Empfohlene Anwendung: Unterstützung von steifen, schwachen oder verletzten Daumen.

Zusammensetzung: Urethanschäum, Polyester, Elasthan, Kunststoff (Polyacetal), Nylon.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

Hilft bei der Unterstützung und Stabilisierung von schmerzenden, schwachen oder verletzten Daumen.

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Alltägliche Aktivitäten, allgemeine Unterstützung und handwerkliche Tätigkeiten

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Zwei Stützen zur Stabilisierung des Daumens.
- 2 Handgelenk-Schiene.
- 3 Freie Beweglichkeit der restlichen Finger.


GRÖSSE:




| Artikelnummer | Größe | PHC | CM |
|---------------|-------|---------|--|
| 45841DABI | S/M | 4674072 | Daumen 5.1-6.4 Handgelenk 12.7-19.1 |
| 45842DABI | L/XL | 4674132 | Daumen 6.4-7.6 Handgelenk 17.8-22.9 |

Umfang des Handgelenks messen.


TRAGEANWEISUNG:

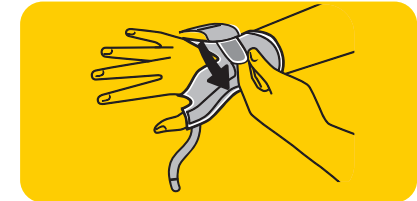

Öffnen Sie alle Klettverschlüsse und stecken Sie den Daumen in das Daumenloch. Wickeln Sie die Bandage um die Hand und schließen Sie den Verschluss unter dem Handgelenk.

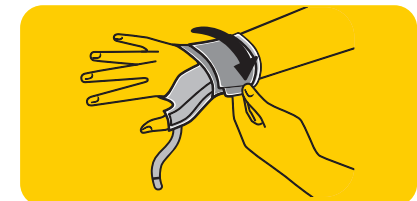

Wickeln Sie das lange Band um das Handgelenk und sichern Sie es. Passen Sie beide Verschlüsse an, bis Sie ein straffes, aber bequemes Tragegefühl haben.

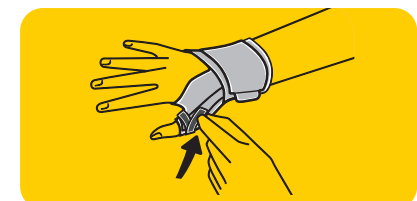

Wickeln Sie das Daumenband um den Daumen und sichern Sie es, so dass es gut sitzt. Sie können es für zusätzliche Stabilität auch um den Daumenballen wickeln.

Die Stützen können entsprechend der empfohlenen Position angepasst oder für einen mittleren Stützgrad vollständig entfernt werden.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
www.3mschweiz.ch/futuro

