



# FUTURO™ DELUXE TUMSTÖD

45841-42



Avsedd användning: För att ge stöd åt en stel, svag eller skadad tumme.

Material: Uretanskum, Polyester, Elastan, Plast (polyacetal), Nylon.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Hjälper till att stabilisera och ge stöd åt en öm, svag eller skadad tumme.

## PERFEKT FÖR:

Vardagsaktiviteter, allmänt stöd och hantverk

## VIKTIGA FUNKTIONER:


- ① Två fästen för att stabilisera tummen .
- ② Justerbar handledsrem för ökat stöd.
- ③ Ger de andra fingrarna fri rörlighet.

## STORLEK:




Artikel nummer	Storlek	CM
45841	S/M	Tumme: 5.1-6.4 Handled: 12.7-19.1
45842	L/XL	Tumme: 6.4-7.6 Handled: 17.8-22.9


## ANVÄNDNING:

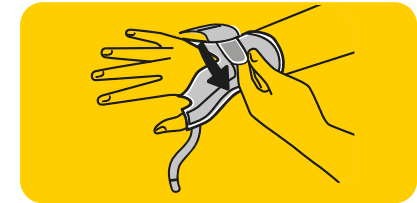

Öppna alla kardborreband och för in tummen i tumhålet. Fäst kardborrebandet vid handledens bas.

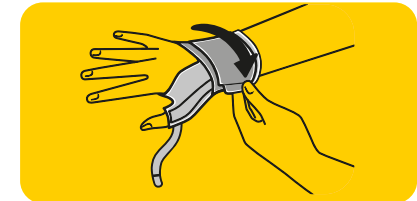

Linda det långa bandet runt handleden och fäst det. Justera båda fästena tills stödet sitter stabilt men ändå bekvämt.

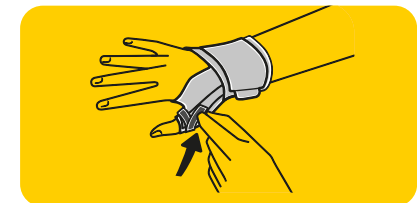

Linda tumbandet runt tummen och fäst det för bättre passform, eller längs tummens bas för ökad stabilitet.

Skenorna kan justeras för att ge plats åt rekommenderad positionering, eller tas bort helt.

3M Svenska AB  
Herrjärva torg 4,  
170 67 Solna  
Sweden

