



FUTURO™ ESTABILIZADOR DELUXE DEL PULGAR - BEIGE

45841-42

 **SOPORTE
MODERADO**



**MATERIALES
TRANSPIRABLES**

Uso previsto: Proporciona soporte a pulgares rígidos, debilitados o lesionados.

Composición: Urethane Foam, Polyester, Elastane, Plastic (Polyacetal), Nylon.
Si siente malestar o dolor, o si esos síntomas persisten o aumentan, deje de utilizar el soporte y consulte a un médico.
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

Ayuda a estabilizar y proporciona soporte a pulgares doloridos, débiles o lesionados.

IDEAL PARA:

Actividades diarias, soporte general y trabajos manuales

CARACTERÍSTICAS:


- 1 Dos soportes para garantizar la estabilidad del pulgar .
- 2 Correa ajustable en la muñeca para un mayor soporte.
- 3 Permite libertad de movimientos del resto de los dedos.

TOMAR LA MEDIDA:


CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
208544.2	S/M	Pulgar: 5.1-6.4 Muñeca: 12.7-19.1
208543.5	L/XL	Pulgar: 6.4-7.6 Muñeca: 17.8-22.9




CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

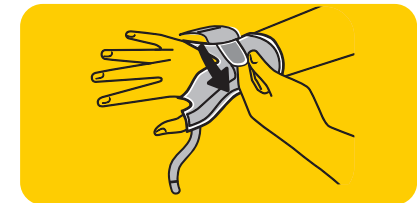

Abir el sistema de cierre e introducir el pulgar en el orificio para el pulgar. Envolver la mano con el estabilizador y fijar el sistema de cierre en la base de la muñeca.

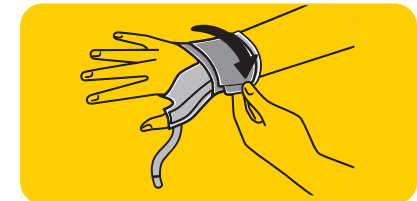

Envolver la muñeca con la correa larga y sujetar. Ajustar ambos cierres hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.

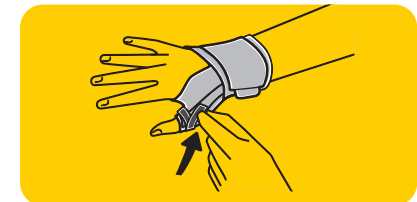

Envolver y sujetar el pulgar con la correa para el pulgar para un mejor ajuste o alrededor de la base del pulgar para una mayor estabilidad.

Los soportes pueden ajustarse para amoldarlos a la posición recomendada o bien pueden eliminarse por completo para ofrecer un soporte moderado.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

3M