



# FUTURO™ DELUXE ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΤΙΧΕΙΡΑ

45841-42



ΑΝΑΠΝΕΟΝΤΑ  
ΥΛΙΚΑ

Προβλεπόμενη χρήση: Για στήριξη σε δύσκαμπτο, αδύναμο ή τραυματισμένο αντίχειρα.

Σύνθεση: Urethane Foam, Polyester, Elastane, Plastic (Polyacetal), Nylon.

Αν προκληθούν, επιμένουν ή επιδεινωθούν οι ενοχλήσεις ή ο πόνος, διακόψτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό.

Τα 3M και FUTURO είναι εμπορικά σήματα της 3M.

Βοηθάει στη στήριξη και σταθεροποίηση καταπονημένου, αδύναμου ή τραυματισμένου αντίχειρα.

## ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ:

Καθημερινές δραστηριότητες, γενική στήριξη και εργασία

## ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ:


- 1 Δύο στηρίγματα, για σταθεροποίηση του αντίχειρα .
- 2 Ρυθμιζόμενο περικάρπιο, για πρόσθετη στήριξη.
- 3 Επιτρέπει την ελεύθερη κίνηση των υπόλοιπων δακτύλων.

## ΜΕΓΕΘΗ:


Κωδικός Αναφοράς	Μέγεθος	Εκατοστά
45841	S/M	Αντίχειρας: 5.1-6.4 Καρπός: 12.7-19.1
45842	L/XL	Αντίχειρας: 6.4-7.6 Καρπός: 17.8-22.9




## ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΦΟΡΕΣΕΤΕ:

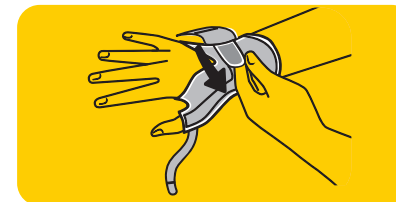

Ανοίξτε όλα τα συνδετικά συγκράτησης και τοποθετήστε τον αντίχειρα στο άνοιγμα για τον αντίχειρα. Τυλίξτε τον νάρθηκα γύρω από το χέρι και στερεώστε το συνδετικό συγκράτησης στη βάση του καρπού.

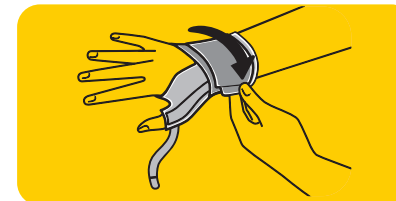

Τυλίξτε τον μακρύ ιμάντα γύρω από τον καρπό και στερεώστε τον. Ρυθμίστε και τα δύο συνδετικά συγκράτησης μέχρι να αισθάνεστε ότι η εφαρμογή είναι σταθερή, αλλά και άνετη.

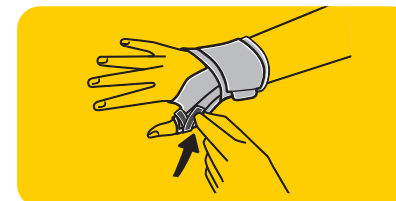

Τυλίξτε και στερεώστε τον ιμάντα του αντίχειρα γύρω από τον αντίχειρα για καλύτερη εφαρμογή ή γύρω από τη βάση του αντίχειρα για πρόσθετη σταθεροποίηση.

Τα στηρίγματα μπορούν να ρυθμιστούν για να προσαρμοστούν στη συνιστώμενη θέση ή να αφαιρεθούν εντελώς για μέτρια στήριξη.

3M Ελλάς ΜΕΠΕ  
Λεωφόρος Κηφισίας 20  
15125, Μαρούσι, Αθήνα  
www.3M.gr

