



FUTURO™ ATTELLE DE POUCE

45841-42

 SOUTIEN
MODÉRÉ



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Pour soutenir un pouce raide, faible ou blessé.

Composition: Urethane Foam, Polyester, Elastane, Plastic (Polyacetal), Nylon.

Si une gêne ou une douleur survient, persists ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

c

Permet de soutenir et de stabiliser un pouce endolori, faible ou blessé.

INDIQUÉ POUR:

Activités quotidiennes, soutien général et bricolage

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:


- ① Deux baleines pour la stabilité du pouce.
- ② Sangle de poignet réglable pour un soutien supplémentaire.
- ③ Permet le libre mouvement des doigts restants.

TAILLES:


Category Number	Size	cm
45841	S/M	Thumb: 5.1-6.4 Wrist: 12.7-19.1
45842	L/XL	Thumb: 6.4-7.6 Wrist: 17.8-22.9




MODE D'EMPLOI:

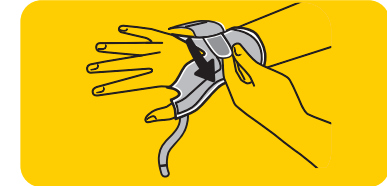

Ouvrez toutes les attaches à crochets et à boucles et faites glisser le pouce dans le trou prévu à cet effet. Entourez l'attelle autour de la main et attachez la sangle à la base du poignet.

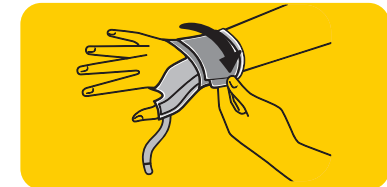

Entourez la longue sangle autour du poignet et fixez celle-ci. Ajustez les deux fermetures jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

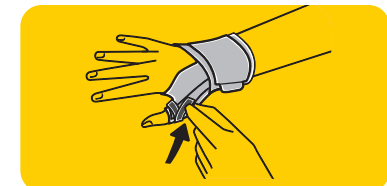

Enroulez et fixez la sangle autour du pouce pour un meilleur ajustement, ou le long de la base du pouce pour plus de stabilité.

Vous pouvez ajuster les baleines pour les adapter au positionnement recommandé, ou les retirer complètement pour obtenir un soutien modéré.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

