



FUTURO™ DELUXE TOMMELSTABILISATOR

45841-42

 MODERAT
STØTTE



ÅNDBARE
MATERIALER

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, svage eller skadede tommelfingre.

Materialesammensætning: Urethanskum, Polyester, Elastan, Plastik (Polyacetal), Nylon.

Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

Hjælper med at støtte og stabilisere
ømme, svage eller skadede
tommelfingre.

VELEGNET TIL:

Hverdagsaktiviteter, generel støtte og
håndarbejde

NØGLEFUNKTIONER:


- 1 To stivere for tommelfingerstabilitet.
- 2 Justerbar håndledsstrop giver øget støtte.
- 3 Muliggør fri bevægelse af de andre fingre.

STØRRELSESVALG:




Varenr	Størrelse	CM
212113	S/M	Tommelfinger: 5.1-6.4 Håndled: 12.7-19.1
212114	L/XL	Tommelfinger: 6.4-7.6 Håndled: 17.8-22.9

SÅDAN BRUGES DEN:

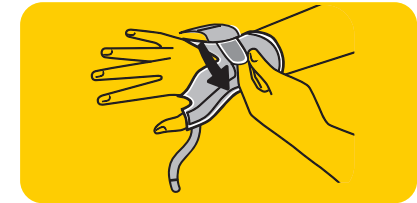

Åbn alle krog og løkke-lukninger, og før tommelfingeren ind i tommelfingerhullet. Vikl stabilisatoren omkring hånden, og fastgør lukningen ved den nederste del af håndledet.

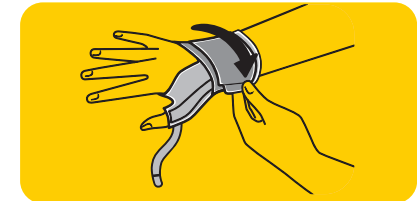

Vikl den lange strop omkring håndledet, og fastgør den. Juster begge lukninger, indtil den sidder fast, men alligevel føles behagelig.



Vikl og fastgør tommelfingerstroppen omkring tommelfingeren for bedre pasform eller langs tommelfingerens nederste del for øget stabilitet.

Stiverne kan justeres i forhold til den anbefalede placering eller fjernes fuldstændigt for moderat støtte.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

3M