



FUTURO™ FEUCHTIGKEITSREGULIERENDE KNIE-BANDAGE

45694DABI, 45696DABI, 45697DABI



MITTLERER
STÜTZGRAD



Leistungsstarkes Design zur Unterstützung bei Aktivitäten.

IDEAL FÜR:

Allgemeine Stützfunktion, Radfahren, Tennis, Training

EIGENSCHAFTEN:

- 1 Anatomisch geformt mit zwei Klettverschlüssen für stabilen Halt.
- 2 Patellaöffnung zur optimalen Unterstützung der Kniescheibe.
- Einzigartige Materialzusammensetzung für starken Halt, schmerzlindernde Wärme und Komfort.

GRÖSSE:



Artikelnummer	Größe	PHC	CM
45694DABI	S	4464736	33.0-38.1
45696DABI	M	4464742	38.1-43.2
45697DABI	L	4464759	43.2-48.3



GERUCHSABWEISEND



ATMUNGSAKTIVES
MATERIAL

Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neopren-Gummimischungen. Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Zusammensetzung: Neoprenmischung, Nylon, Polyester, Elasthan.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

TRAGEANWEISUNG:



Öffnen Sie alle Verschlüsse und ziehen Sie die Bandage mit dem weiteren Ende voran über den Fuß. Platzieren Sie den Patellaring über der Kniescheibe.



Befestigen Sie das obere Band um das obere Ende der Bandage.



Befestigen Sie das untere Band um das untere Ende der Bandage.

Spannen Sie beide Bänder, bis die Bandage eng, aber bequem anliegt.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

3M