



# FUTURO™ GENOUILLÈRE HYDRO-RÉGULATRICE

45694, 45696, 45697



RÉSISTANT  
AUX ODEURS



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

**AVERTISSEMENT:** Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc. En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Mélange de Néoprène, Nylon, Polyester, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Conception haute performance pour un soutien actif.

## INDIQUÉ POUR:

Soutien général, vélo, tennis, activités sportives

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Genouillère avec double sangle de précision pour un ajustement optimal.
- ② Design avec anneau rotulien, pour le soutien et le confort de la rotule.
- Mélange unique de matériaux pour soutien ferme, chaleur apaisante et confort.

## TAILLES:



Référence	PHC	Taille	CM
45694	4464736	S	33.0-38.1
45696	4464742	M	38.1-43.2
45697	4464759	L	43.2-48.3

## MODE D'EMPLOI:



Ouvrez toutes les fermetures et faites glisser le support au-dessus du pied en commençant par l'extrémité la plus large. Positionnez l'anneau de la rotule au niveau de celle-ci.



Fixez la sangle supérieure le long du bord supérieur du support.



Fixez la sangle inférieure le long du bord inférieur du support.

Serrez les deux sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M (Suisse) S.à r.l.  
Consumer Health Care  
Eggstrasse 93  
8803 Rüslikon  
www.3msuisse.ch/futuro

