



FUTURO™ PERFORMANCE KNÄSTÖD

45694, 45696, 45697



LUKTAVVISANDE



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: Ger stöd till stela, svaga eller skadade knän.

VAR FÖRSIKTIG! En del personer kan vara överkänsliga mot produkter som innehåller neopren. Vid hudutslag, avbryt användning och rådfråga en läkare

Material: Neopren, Nylon, Polyester, Spandex.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Effektiv modell som ger stöd under aktivitet.

PERFEKT FÖR:

Generellt stöd, cykling, tennis, träning

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Kroppsformat stöd med dubbla precisionsremmar för optimal passform.
 - 2 Modell med öppning över knäskålen ger stöd och komfort.
- Unik materialblandning ger stabilt stöd, värme och komfort.

STORLEK:



Artikel Nummer	Storlek	CM
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3

ANVÄNDNING:



Öppna alla fästen och trä stödet över foten med den bredare änden först. Positionera patellahålet över knäskålen.



Fäst det övre kardborrebandet längs stödets överkant.



Fäst det undre kardborrebandet längs stödets nedre kant.

Dra åt bägge banden tills passformen är stabil men bekväm.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

3M