



FUTURO™ RODILLERA

45694, 45696, 45697



**MATERIAL QUE PREVIENE
LA FORMACIÓN DE OLORES
DESAGRADABLES**



**MATERIAL
TRANSPIRABLE**

Uso previsto: Ofrece sujeción a rodillas rígidas, debilitadas o lesionadas.

PRECAUCIÓN: Algunas personas pueden ser sensibles al neopreno o a la mezcla de goma y neopreno. En caso de erupción cutánea, dejar de utilizar y consultar a un médico.

Composición: Neoprene blend, nylon, polyester, spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

Diseño de alto rendimiento que ofrece sujeción mientras se realizan actividades.

IDEAL PARA:

Suporte general, ciclismo, tenis, ejercicio

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Forma anatómica con dos tiras de precisión para un ajuste óptimo.
- 2 Rótula al descubierto para mayor sujeción y comodidad.
- Exclusiva mezcla de materiales que ofrecen sujeción firme, calor relajante y mayor comodidad.

TOMAR LA MEDIDA:



CÓDIGO NACIONAL	TALLA	CM
218883.9	S	33.0-38.1
218891.4	M	38.1-43.2
218909.6	L	43.2-48.3

CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



Abra todos los cierres y deslice el soporte sobre el pie comenzando por el extremo más ancho. Sitúe el orificio de la apertura rotuliana sobre la rótula.



Fije la correa superior a lo largo del borde superior del soporte.



Fije la correa inferior a lo largo del extremo inferior del soporte.

Apriete ambas correas hasta conseguir una sujeción firme pero cómoda.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

