



FUTURO™ SUPORTE PARA JOELHO

45694, 45696, 45697



SUPORTE
MODERADO



RESISTENTE A
ODORES



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Finalidade: Ajuda a proporcionar suporte a joelhos rígidos, frágeis ou lesionados.

CUIDADO: Algumas pessoas podem ser sensíveis ao neoprene ou à borracha neoprene. Se se desenvolver irritação da pele, interrompa a utilização e consulte um médico.

Composição: Neoprene blend, nylon, polyester, spandex.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

Design de elevado desempenho, para proporcionar suporte durante a atividade.

IDEAL PARA:

Suporte geral, ciclismo, ténis e exercício

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 Manga curva com tiras de precisão duplas, para um ajuste perfeito.
- 2 Design em patela aberta, para apoio e conforto da rótula.
- Combinação exclusiva de materiais resistentes, para um apoio robusto e um calor e conforto relaxantes.

TAMANHOS:

C.N.P	Size	CM
7908343	S	33.0-38.1
7908376	M	38.1-43.2
7908384	L	43.2-48.3



COMO UTILIZAR:



Abra todos os fechos e faça deslizar o suporte sobre o pé, começando pela extremidade mais larga. Posicione o anel patelar sobre a rótula.



Fixe a faixa superior ao longo da extremidade superior do suporte.



Fixe a faixa inferior ao longo da extremidade inferior do suporte.

Ajuste ambas as faixas até sentir firmeza e conforto.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

