



FUTURO™ PERFORMANCE KNESTØTTE

45694, 45696, 45697



LUKTAVVISENDE



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltenkt bruk: Støtte for stivt, svakt eller skadet kne.

FORSIKTIG: Noen personer kan være følsomme for neopren eller blandinger som inneholder neopren. Hvis du får utslett, stopp bruken og oppsøk lege.

Composition: Neoprene blend, nylon, polyester, spandex.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Utviklet for å gi maksimal støtte under aktivitet

IDEELL FOR:

Generell støtte, sykling, tennis, styrketrening

NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Formet støtte med doble stropper for optimal tilpasning.
 - 2 Åpen patella til støtte og komfort for kneskålen.
- Unik blanding av materialer for sterk støtte, lindrende varme og komfort.

STØRRELSER:

Category Number	Størrelse	CM
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3



VED BRUK:



Åpne opp alle låsene, skyv støtten over foten og start med den bredeste enden. Plasser patellaringen over kneskålen.



Sikre den øverste stroppen langs toppkanten av støtten.



Sikre den nederste stroppen langs bunnkanten av støtten.

Stram begge stroppene til de sitter tett, men likevel i en behagelig posisjon.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

3M