



# FUTURO™ SUPPORTO PER GINOCCHIO

45694, 45696, 45697



RESISTENTE  
AGLI ODORI



MATERIALE  
TRASPIRANTE

Destinazione d'uso: Per supportare ginocchia rigide, deboli o lesionate.

**ATTENZIONE:** Alcune persone possono essere sensibili al neoprene o alla gomma in miscela di neoprene. In caso di arrossamento interrompere l'uso e consultare un medico.

Composition: Neoprene blend, nylon, polyester, spandex.

Se compaiono, persistono o aumentano dolori e fastidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del supporto e consultare il medico.

I prodotti della linea 3M Futuro sono Dispositivi Medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.

Comunicazione tecnico-scientifica riservata a Professionisti sanitari, Farmacisti e Fisioterapisti.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Design ad alte prestazioni per il supporto durante le attività.

## IDEALE PER:

Supporto generale, ciclismo, tennis, esercizio

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO:

- 1 Ginocchiera sagomata con doppie cinghie di precisione per un adattamento ottimale
  - 2 Design aperto sulla patella per il supporto e il comfort della rotula.
- La miscela esclusiva di materiali offre un supporto forte, calore che dà sollievo e comfort.

## TAGLIA:

Codice Prodotto	Taglia	CM
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3



## COME INDOSSARLO:



Aprire tutte le chiusure e far scorrere il tutore al di sopra del piede partendo dall'estremità più larga. Posizionare l'anello della patella sulla rotula.



Fissare la fascia superiore lungo il bordo superiore del tutore.



Fissare la fascia inferiore lungo il bordo inferiore del tutore.

Stringere entrambe le fasce fino a ottenere una vestibilità salda, ma comoda.

3M Office  
Via N. Bobbio 21  
20096 Piofello MI  
[www.3mitalia.it/futuro](http://www.3mitalia.it/futuro)

