



FUTURO™ GENOUILLÈRE HYDRO-RÉGULATRICE

45694, 45696, 45697



RÉSISTANT
AUX ODEURS



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc. En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Neoprene blend, nylon, polyester, spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Conception haute performance pour un soutien actif.

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, vélo, tennis, activités sportives

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Genouillère avec double sangle de précision pour un ajustement optimal.
- ② Design avec anneau rotulien, pour le soutien et le confort de la rotule.
- Mélange unique de matériaux pour soutien ferme, chaleur apaisante et confort.

TAILLES:

Category Number	Size	cm
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3



MODE D'EMPLOI:



Ouvrez toutes les fermetures et faites glisser le support au-dessus du pied en commençant par l'extrémité la plus large. Positionnez l'anneau de la rotule au niveau de celle-ci.



Fixez la sangle supérieure le long du bord supérieur du support.



Fixez la sangle inférieure le long du bord inférieur du support.

Serrez les deux sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

