



FUTURO™ PERFORMANCE POLVITUKI

45694, 45696, 45697



EHKÄISEE HAJUJEN
MUODOSTUMISTA



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Auttaa tukemaan jäykkää, heikkoa tai vahingoittunutta polvea.

VAROITUS: Jotkut henkilöt voivat olla yliherkkiä neopreenille tai neopreeniseoskumille. Jos saat ihottumaa, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

Koostumus: neopreeniseos, nailon, polyesteri, spandex.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Hyvän suorituskyvyn mahdollistava muotoilu.

SOPII KÄYTETTÄVÄKSI:

Yleistukena esim, pyöräilyyn, tennikseen ja muuhun urheiluun.

OMINAISUUDET:

- 1 Muotoiltu kangas ja kaksi tarkasti kiristettävää kiinnitysnauhaa takaavat optimaalisen istuvuuden.
 - 2 Avoin muotoilu tukee miellyttävästi polvilumpiota.
- Ainutlaatuinen materiaalseos antaa vahvan tuen, miellyttävää lämpöä ja käyttömukavuutta.

KOKO:



Tuotekoodi	Koko	CM
45694	S	33.0-38.1
45696	M	38.1-43.2
45697	L	43.2-48.3

TUEN ASETTAMINEN:



Avaa kaikki sulkimet ja vedä tuki jalkaan alkaen leveästä päästä. Aseta polvilumpiorengas polvilumpion päälle.



Kiristä ylähihna tuen yläreunan suuntaisesti.



Kiinnitä alahihna tuen alareunan suuntaisesti. Kiristä molempia hihnoja, kunnes tuki tuntuu tiukalta mutta mukavalta.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

3M