



FUTURO™ COMFORT HANDLEDSSTÖD MED SKENA

10770



VENTILERANDE
MATERIAL

Avsedd användning: För att ge stöd åt stel, svag eller skadad handled.

*Läkare rekommenderar ofta användning av ett stabilt handledsstöd vid behandling av karpaltunnelsyndrom och andra smärtsamma tillstånd.

Material: Aluminium, Polyester, Polyuretan, Nylon, Spandex.

Om obehag eller smärta uppstår, kvarstår eller ökar, avbryt användningen och kontakta läkare.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Stabiliserar och stöder öm, svag eller skadad handled.

PERFEKT FÖR:

Stöd för enklare skador som vrickningar och symptom på karpaltunnelsyndrom*

VIKTIGA FUNKTIONER:

- 1 Ergonomisk design med låg profil ger fingrarna fri rörlighet.
- 2 Skena i handflatan ger stabilitet.
- 3 Design med tre band för justerbar passform.


STORLEK:

Artikel nummer	CM
10770	14-21.5

Mät runt handleden på det smalaste stället.



ANVÄNDNING:

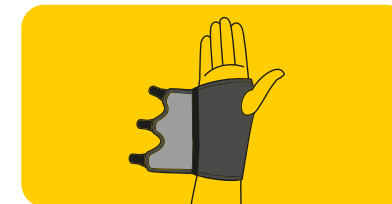


Öppna alla fästordningar. Sätt in handen i stödet med metallskenan positionerad längs handflatan.



Fäst det mellersta bandet, och sedan de två övriga banden.

För användning på vänster hand - ta ut skenan ur fickan. Håll i skenan och vrid på handledsstödet. För in skenan i motsatt ficköppning.

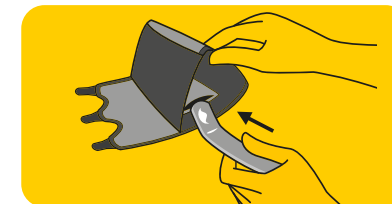

Justera alla band tills stödet sitter stabilt men ändå bekvämt.

3M Svenska AB
Herrjärva torg 4,
170 67 Solna
Sweden

3M