



FUTURO™ MUÑEQUERA ESTABILIZADORA REVERSIBLE

10770

 **SOPORTE MODERADO**



**MATERIAL
TRANSPIRABLE**

Uso previsto: Proporciona soporte a muñecas rígidas, debilitadas o lesionadas.

*Los médicos suelen recomendar el uso de una muñequera rígida para tratar el síndrome del túnel carpiano y otros trastornos dolorosos de la muñeca.

Composición: Aluminium, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.

3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

Estabiliza y proporciona sujeción a muñecas doloridas, débiles o lesionadas.

IDEAL PARA:

Proporciona sujeción en caso de lesiones comunes como esguinces y torceduras y síntomas del síndrome del túnel carpiano*

CARACTERÍSTICAS:

- 1 Su diseño ergonómico y reducido permite mover los dedos con facilidad.
- 2 Estabilizador palmar que proporciona una estabilización moderada.
- 3 Diseño tipo manga con tres tiras para un ajuste personalizado.

TOMAR LA MEDIDA:

CÓDIGO NACIONAL	CM
208540.4	14-21.5

Medir el contorno de la muñeca a partir del punto de menor tamaño.



CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:




Abra los cierres. Introduzca la mano en el soporte colocando la férula metálica a lo largo de la palma.



Cerrar la correa central y a continuación las correas contiguas.

Si se utiliza la mano izquierda: saque la férula del bolsillo. Sujete la férula firmemente, gire el soporte e introduzca la férula en la abertura del bolsillo opuesto. Introduzca el extremo de la férula en el bolsillo.

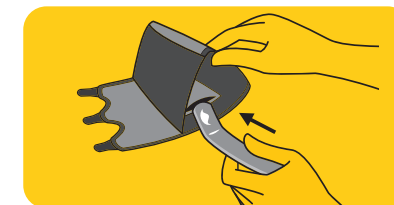

Ajuste todas las correas hasta conseguir una sujeción firme y cómoda.

3M España
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25
28027 Madrid

3M