



FUTURO™ ESTABILIZADOR REVERSÍVEL DE PULSO

10770

 SUPORTE
MODERADO



MATERIAL
RESPIRÁVEL

Estabiliza e suporta o pulso dorido,
fraco ou lesionado.

IDEAL PARA:

Suporte para lesões comuns, como entorses, distensões e sintomas da Síndrome do Canal Cárpico*

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 O design ergonómico de corte baixo permite o movimento livre dos dedos.
- 2 O estabilizador palmar ajuda a proporcionar estabilidade moderada.
- 3 Design da manga com três faixas para ajuste confortável.

TAMANHOS:

C.N.P	CM
6180034	14-21.5

Tire a medida à volta do pulso no ponto mais pequeno.



COMO UTILIZAR:




Abra os fechos. Introduza a mão na braçadeira com a tala metálica posicionada ao longo da palma da mão.



Feche a faixa central e, em seguida, as faixas adjacentes.

Para utilização com a mão esquerda - Puxe a tala para fora da bolsa. Segure firmemente na tala, rode a braçadeira e deslize a tala para a abertura oposta da bolsa. Empurre a extremidade da tala para dentro da bolsa. Siga as instruções de uso acima.

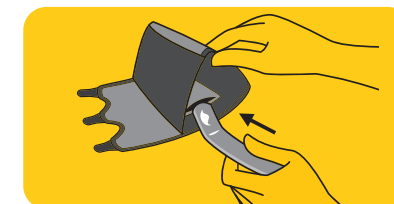

Ajuste todas as faixas até sentir firmeza e conforto.

Finalidade: Proporcionar suporte de pulso rígido, fraco ou lesionado.

*Os médicos recomendam frequentemente o uso de um suporte de pulso rígido durante o tratamento da Síndrome do Canal Cárpico e noutros quadros dolorosos dos pulsos

Composição: Alumínio, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.

3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA
1990-138 Lisboa

3M