



FUTURO™ COMFORT STABILISERENDE HÅNDEDDSTØTTE

10770



PUSTENDE
MATERIALE

Stabiliserer og støtter sårt, svakt eller skadet håndledd.

IDEELL FOR:

Støtte ved vanlige skader som forstuinger, forstrekninger og symptomer på karpaltunnelsyndrom*

NØKKELEGENSKAPER:

- 1 Lavt skjært, ergonomisk design gir frihet til fingerbevegelser.
- 2 Håndflatestabilisator bidrar til å gi moderat stabilitet.
- 3 Hylsesystem med tre stropper gir tilpasningsmuligheter.

STØRRELSER:

Category Number	CM
10770	14-21.5

Mål rundt håndleddet der det er smalast.



VED BRUK:




Åpne festene. Stikk hånden inn i støtten med metallsplinten langs håndflaten.



Lukk midtstroppen og deretter stroppene ved siden av.

For venstrehåndsbruk - Skyv splinten ut av lommen. Hold splinten klar, roter bandasjen og skyv splinten inn i motsatt sporåpning. Sett enden av splinten inn i lommen.

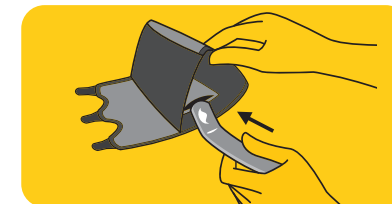

Juster alle stroppene til det føles stramt, men komfortabelt.

Tiltent bruk: Støtte for stivt, svakt eller skadet håndledd.

*Leger anbefaler ofte bruk av en stiv håndleddstøtte ved behandling av karpaltunnelsyndrom og andre smertefulle håndleddstilstander.

Composition: Aluminium, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.

3M and FUTURO are trademarks of 3M.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

3M