



FUTURO™ ATELLE DE POIGNET RÉVERSIBLE

10770

 SOUTIEN
MODÉRÉ



MATÉRIAU
RESPIRANT

Stabilise et soutient un poignet raide,
douloureux ou blessé.

INDIQUÉ POUR:

Soutien aux blessures courantes telles que
les foulures, les entorses ou les symptômes
du syndrome du canal carpien*

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Design ergonomique permettant un mouvement libre des doigts.
- 2 Le stabilisateur palmaire aide à fournir une stabilité modérée.
- 3 Attelle design avec trois sangles pour une mise en place ajustée

TAILLES:

Category Number	cm
10770	14-21.5

Mesurez le tour du poignet à l'endroit le plus petit.



MODE D'EMPLOI:




Ouvrez les fixations. Faites glisser la main dans l'orthèse avec l'attelle métallique placée le long de la paume de la main.



Fermez la sangle centrale, puis les sangles adjacentes.

Dans le cas d'une utilisation de la main gauche - sortir l'attelle en métal hors de la poche. Maintenez l'attelle stable, faites pivoter l'orthèse et glissez l'attelle métallique dans l'ouverture opposée de la poche. Rentrez l'extrémité de l'attelle métallique dans la poche.

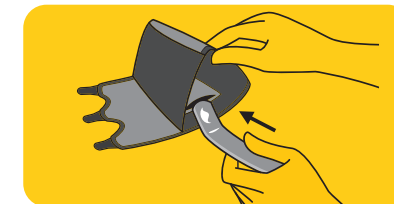

Réglez toutes les sangles jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

*Les médecins recommandent généralement l'utilisation d'une attelle rigide pendant le traitement du syndrome du canal carpien, ou d'autres problèmes de poignet douloureux

Composition: Aluminium, Polyester, Polyurethane, Nylon, Spandex.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M