



FUTURO™ COMFORT STABILOIVA RANNETUKI

10770

 KESKITASON
TUKI



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Jäykän, heikon tai vahingoittuneen ranteen tukeminen.

*Lääkärit suosittelevat usein jäykän rannetuen käyttöä rannekanavaoireyhtymän ja muiden ranteen kiputilojen hallintaan.

Koostumus: alumiini, polyesteri, polyuretaani, nailon, elastaani.

Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

Stabiloi ja tukee kipeää, heikkoa tai vahingoittunutta rannetta.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tukee lieviä vaurioita, kuten venähdyksiä ja rannekanavaoireyhtymän* oireita

OMINAISUUDET:

- 1 Matala ja ergonominen muotoilu mahdollistaa sormien vapaan liikkumisen.
- 2 Kämmenten vakauttaja antaa tasaisen tuen.
- 3 Kolmella hihnalla varustettu hihamainen muotoilu on helppo säätää istuvaksi.

KOKO:

Tuotekoodi	CM
10770	14-21.5

Ranteen ympärysmitta sen kapeimmasta kohdasta.



TUEN ASETTAMINEN:




Avaa kiinnittimet. Aseta käsi tukeen niin, että metallilasta on kämmenen suuntaisesti.



Sulje ensin keskimäinen hihna ja sitten muut hihnat.

Vasenkäätiset käyttäjät – Liu'uta lasta pois taskusta. Pidä lastaa vakaasti kädessä, käännä tukea ja liu'uta lasta päinvastaiseen taskuun. Työnnä lastan pää taskuun.

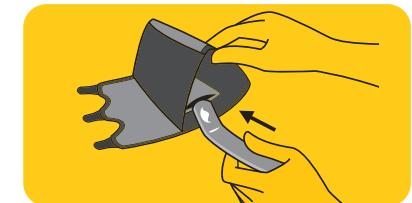

Säädä kaikkia hihnoja, kunnes tuki asettuu lujasti mutta mukavasti.

Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 ESPOO

3M