



FUTURO™ OMKEERBARE POLSSPALK

10770



ADEMEND
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

*Artsen raden vaak het gebruik van een rigide polsbrace aan voor behandeling van carpal tunnel-syndroom en andere pijnlijke polsaandoeningen.

Samenstelling: Aluminium, Polyester, Polyurethaan, Nylon, Spandex.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Stabiliseert en ondersteunt pijnlijke, zwakke of geblesseerde polsen.

IDEAAL VOOR:

Ondersteuning bij veelvoorkomende blessures, zoals verstuikingen, overbelasting en symptomen van carpal tunnel-syndroom*

HOOFDKENMERKEN:

- 1 Laag uitgesneden, ergonomisch ontwerp voor vrije vingerbewegingen.
- 2 Palmstabilisator voor gemiddelde stabilisatie.
- 3 Lang ontwerp met drie riemen voor een verstelbare pasvorm.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
10770	3278041	14-21.5

Meet rondom de pols waar deze het smalst is.



DRAAGINSTRUCTIES:




Open de sluitingen. Schuif een hand in de brace met de metalen spalk over de handpalm.



Sluit eerst de middelste riem en vervolgens de overige riemen.

Voor gebruik op de linkerhand: schuif de spalk uit het zakje. Houd de spalk stabiel, draai de brace en schuif de spalk in de opening van het andere zakje. Steek het uiteinde van de spalk in het zakje.

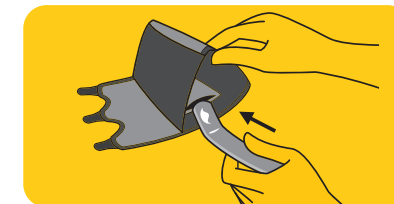

Verstel alle riemen totdat de brace strak maar comfortabel zit.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

