



# FUTURO™ COMFORT STABILISERENDE HÅNDESSKINNE

10770



ÅNDBART  
MATERIALE

## Håndledsbandage Rev Splint Justerbar Sort.

### VELEGNET TIL:

Giver støtte til almindelige skader som forstuvning, overbelastning og symptomer på karpaltunnelsyndrom\*

### NØGLEFUNKTIONER:

- 1 Lavt udskåret ergonomisk design muliggør fri bevægelse af fingrene.
- 2 Håndfladestabilisatoren bidrager til at give moderat stabilitet.
- 3 Manchetdesign med tre stropper for justerbar pasform.

### STØRRELSESVALG:

Varenr	CM
218291	14-21.5

Mål rundt om håndledet på det smalleste sted.



## SÅDAN BRUGES DEN:




Åbn lukningerne. Før hånden ind i håndledsskinne med metalskinne placeret langs håndfladen.



Luk den midterste strop og derefter de tilstødende stropper.

Til brug på venstre hånd – skub metalskinne ud af lommen. Hold metalskinne fast, drej håndledsskinne rundt, og skub metalskinne ind i den modsatte lommeåbning. Stik enden af metalskinne ind i lommen.

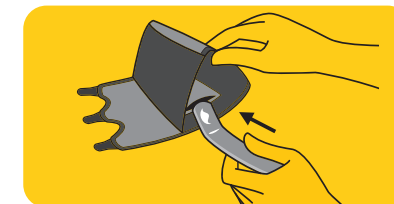

Juster alle stropper, indtil den sidder til, men stadig føles behagelig.

Tilsigtet anvendelse: Støtte til stive, svage eller skadede håndled.

\*Læger anbefaler ofte at bruge en stiv håndledsskinne ved behandling af karpaltunnelsyndrom og andre smertefulde lidelser i håndledet

Materialesammensætning: Aluminium, Polyester, Polyurethan, Nylon, Spandex.

Hvis du oplever ubehag eller smerter som følge af brug, og hvis smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.

3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

3M a/s  
Hannemanns Allé 53  
2300 København S  
Denmark

