



FUTURO™ BRACELET ROTULIEN CUSTOM DIAL

09190



SOUTIEN
FERME



MATÉRIAU
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Polycarbonate, Nylon, Polyuréthane, Polyester, Metal, SEBS, Polypropylène, Élastomère Thermoplastique.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

La molette procure une pression
précise sur le genou douloureux.

INDIQUÉ POUR:

Tendinite du genou, tendinite du tendon
patellaire

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 La molette permet d'augmenter ou de diminuer facilement la pression.
- 2 Système de serrage réglable pour un ajustement personnalisé.
- Le coussinet de gel fournit une pression ciblée sur le tendon sans accroître la pression autour de la jambe.

TAILLES:

Référence	PHC	CM
09190	6446719	31.8-44.5



MODE D'EMPLOI:



1a. Tirez l'attache à crochets dans la fente pour former une boucle dans la sangle. Appliquez sur la jambe sous la pliure du genou.

1b. Le coussinet de gel procure la pression nécessaire et doit être placé au niveau du tendon.



2a. Serrez la sangle à un niveau confortable de faible compression et fixez la languette du crochet sur la sangle. Serrez la molette en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre le niveau de compression souhaité.

2b. Augmentez ou diminuez la pression à l'aide de la molette en fonction du besoin. Ne pas trop serrer.

Pour retirer l'ensemble, desserrez la molette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression, tirez la languette du crochet de la sangle et faites glisser le long de la jambe.

3M (Suisse) S.à r.l.
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüslikon
www.3msuisse.ch/futuro

