



# FUTURO™ SOPORTE ROTULIANO CON AJUSTE DE PRECISIÓN

09190



SOPORTE  
FIRME



El dial regulador permite ajustar fácilmente el nivel de presión en la rodilla dolorida.

## IDEAL PARA:

Condromalacia y rodilla del saltador (rodilla del saltador o tendinitis rotuliana)

## CARACTERÍSTICAS:

- 1 El dial regulador permite aumentar o reducir fácilmente la presión.
- 2 Cierre regulable para un ajuste personalizado.
- La almohadilla aplica presión en el tendón rotuliano sin aumentar la presión de las zonas adyacentes.

## TOMAR LA MEDIDA:

| CÓDIGO NACIONAL | CM        |
|-----------------|-----------|
| 170990.5        | 31.8-44.5 |



## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:



1a. Tire del cierre a través de la ranura para anudar la correa. Coloque en la pierna por debajo de la corva.

1b. La almohadilla de presión debe ser colocada sobre el tendón



2a. Apriete la correa hasta un nivel cómodo de compresión baja y fije el enganche en la correa. Apriete el dial girándolo en sentido contrario al de las agujas del reloj hasta alcanzar el nivel de compresión deseado.

2b. Ajuste el dial regulador para aumentar o reducir la presión según el nivel de actividad; no comprimir en exceso.

Para la retirada, afloje el dial hasta no sentir presión, retire el enganche y saque la pierna.

Uso previsto: Ofrece sujeción a rodillas rígidas, debilitadas o lesionadas.

Composición: Polycarbonato, Nylon, Polyurethane, Polyester, Metal, SEBS, Polypropylene, Thermoplastic elastomer.  
Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.  
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

