



# FUTURO™ SUPORTE DE JOELHO AJUSTÁVEL

09190



SUPORTE  
FIRME



O estabilizador aplica pressão localizada de ajuste fácil no joelho dorido.

## IDEAL PARA:

Tendinite do Joelho, Joelho de Saltador

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- 1 O estabilizador permite aumentar ou diminuir facilmente a pressão.
  - 2 Faixa ajustável tipo velcro para um ajuste personalizado.
- A almofada aplica pressão direcionada no tendão sem aumentar a pressão à volta da perna.

## TAMANHOS:

C.N.P	CM
6316240	31.8-44.5



## COMO UTILIZAR:



1a. Puxe o fecho do gancho pela ranhura para criar uma argola na faixa. Aplique à perna abaixo da dobra do joelho.

1b. A almofada de pressão deve estar localizada contra o tendão.



2a. Ajuste a faixa até um nível confortável de baixa compressão e fixe a patilha de gancho à faixa. Aperte o estabilizador rodando no sentido dos ponteiros do relógio até alcançar o nível de compressão pretendido.

2b. Ajustar o estabilizador para aumentar ou diminuir a pressão conforme o nível de atividade. Não apertar demasiado.

Para tirar, solte o estabilizador até não sentir pressão, puxe a patilha de gancho da faixa, faça deslizar pela perna.

Finalidade: Ajuda a proporcionar suporte a joelhos rígidos, frágeis ou lesionados.

Composição: Polycarbonato, Nylon, Polyurethane, Polyester, Metal, SEBS, Polypropylene, Thermoplastic elastomer.  
Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.  
3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

