



# FUTURO™ KNIERIEM CUSTOM DIAL

09190



STEVIGE  
STEUN



Verstelknop voor eenvoudig instelbare lokale druk op de pijnlijke knie.

## IDEAAL VOOR:

Kniepeesontsteking, springersknie

## HOOFDKENMERKEN:


- 1 Met de verstelknop kunt u de druk eenvoudig verhogen of verlagen.
  - 2 Verstelbare riem met klittenband voor een goede pasvorm.
- Kussen biedt gerichte druk op de pees, zonder de druk rondom het been te verhogen.

## MAAT:

Referentie	CNK	CM
09190	3085784	31.8-44.5




## DRAAGINSTRUCTIES:

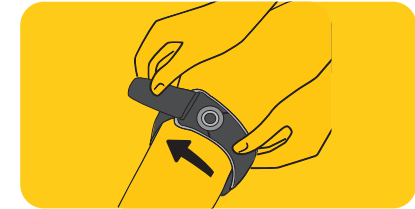

1a. Trek de haak van het klittenband door de sleuf om een lus te maken met de riem. Breng hem op het been aan, onder de buiging van de knie.

1b. Het drukkussen dient tegen de pees geplaatst te worden.

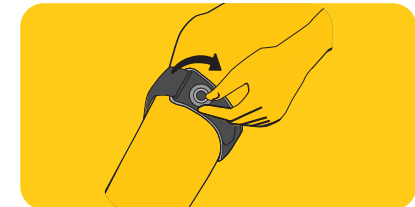

2a. Trek de riem aan tot een comfortabel niveau van lage compressie en bevestig de haaklipjes aan de riem. Span de brace aan door de knop met de wijzers van de klok mee te draaien tot het gewenste compressieniveau is bereikt.

2b. Verhoog of verlaag de druk aan de hand van de draaiknop in functie van het activiteitsniveau; de knop niet te strak aandraaien.

Om te verwijderen: draai de draaiknop tot er geen druk meer wordt gevoeld, trek de haaklipjes uit de riem en schuif de brace van het been.

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

Samenstelling: Polycarbonaat, Nylon, Polyurethaan, Polyester, Metaal, SEBS, Polypropyleen, Thermoplastisch elastomeer. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert. 3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro

