



# FUTURO™ SOPORTE ROTULIANO

09189

**SOPORTE MODERADO**



**MATERIAL  
TRANSPIRABLE**

Uso previsto: Ofrece sujeción a rodillas rígidas, debilitadas o lesionadas.

Composición: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethane Foam, POM, Spandex, Polyethylene, Polypropylene  
Si empieza a sentir malestar o dolor, o bien estos síntomas persisten o aumentan, deje de usarlo y consulte a un médico.  
3M y FUTURO son marcas registradas de 3M.

**Ejerce presión específicamente sobre las rodillas doloridas de saltadores y corredores.**

## IDEAL PARA:

Condromalacia y rodilla del saltador (tendinitis rotuliana)

## CARACTERÍSTICAS:


- ① La almohadilla central ejerce presión para aliviar el dolor del tendón rotuliano.
  - ② Almohadilla reforzada que no se comprime ni se aplana durante su uso.
  - ③ Cierre ajustable para un ajuste personalizado.
- Ligero para llevarlo puesto todo el día.

## TOMAR LA MEDIDA:


CÓDIGO NACIONAL	CM
190231.3	31.8-44.5




## CÓMO UTILIZAR EL SOPORTE:

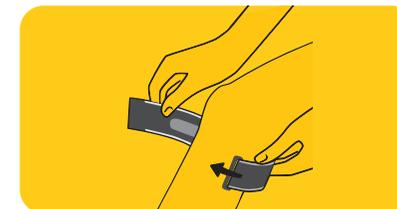

Pase la correa por debajo de la rodilla, con la almohadilla de presión directamente debajo de la rótula, contra la piel.

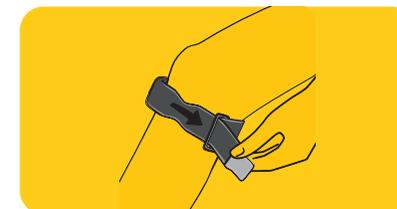

Abroche la correa en la hebilla y pegue el cierre.

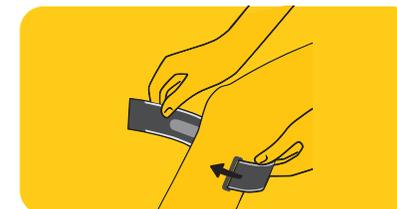

Ajuste la correa hasta conseguir una sujeción firme y cómoda. NO bloquee el flujo sanguíneo.

3M España  
c/ Juan Ignacio Luca de Tena 19-25  
28027 Madrid

