



# FUTURO™ SUPORTE DE RÓTULA

09189



SUPORTE  
MODERADO



MATERIAL  
RESPIRÁVEL

Finalidade: Ajuda a proporcionar suporte a joelhos rígidos, frágeis ou lesionados.

Composição: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethane Foam, POM, Spandex, Polyethylene, Polypropylene  
Se sentir desconforto ou dor, se as dores persistirem ou aumentarem, interrompa a utilização e consulte um médico.  
3M e FUTURO são marcas registradas da 3M.

Proporciona pressão direcionada para joelhos doridos, joelho de corredor ou de saltador.

## IDEAL PARA:

Tendinite do Joelho, Joelho de Saltador

## PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:


- 1 A almofada central aplica pressão direcionada no tendão dorido .
  - 2 O design reforçado da almofada não se comprime nem achata durante a utilização.
  - 3 Tira ajustável para um ajuste personalizado.
- Leve, para utilização durante todo o dia.

## TAMANHOS:


C.N.P	CM
7928739	31.8-44.5




## COMO UTILIZAR:

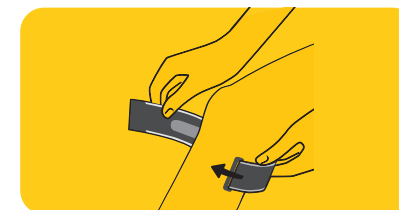

Enrole a faixa logo abaixo do joelho, com a Almofada de Pressão diretamente abaixo da rótula, contra a pele.

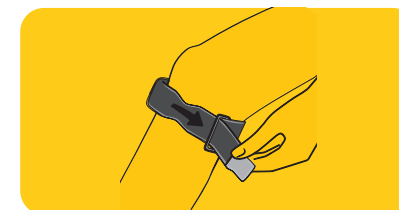

Faça passar a faixa pela argola e fixe a tira à faixa.

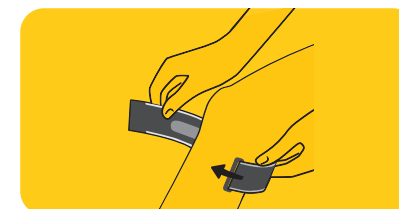

Ajuste a faixa até sentir firmeza e conforto.  
NÃO bloqueie a circulação do sangue.

3M España, Sucursal em Portugal  
Rua do Mar da China, 3 - 3ªA  
1990-138 Lisboa

