



FUTURO™ JUSTERBAR STØTTESTROPP TIL KNE

09189



PUSTENDE
MATERIALE

Tiltent bruk: Støtte for stift, svakt eller skadet kne.

Composition: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethane Foam, POM, Spandex, Polyethylene, Polypropylene
Hvis ubehag eller smerter oppstår, vedvarer eller øker, må du avslutte bruken og kontakte lege.
3M and FUTURO are trademarks of 3M.

Gir målrettet trykk til vondt kne,
patellar tendinopati (jumpers knee)
og løperkne.

IDEELL FOR:

Patellar tendinopati, Jumpers Knee

NØKKELEGENSKAPER:


- 1 Midtputen gir målrettet trykk på vond sene.
- 2 Forsterket pute som ikke komprimeres eller blir flat under bruk.
- 3 Justerbare stropper for tilpasset passform.
 - Lett i vekt for bruk hele dagen.

STØRRELSER:


| Category Number | CM |
|-----------------|-----------|
| 09189 | 31.8-44.5 |



VED BRUK:

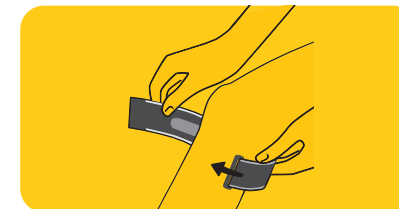

Vri stroppen rett under kneet, med trykkputen rett under kneskålen, mot huden.

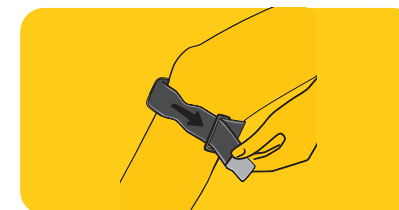

Løft toppremmen gjennom spennen og fest borrelåsen.



Juster stroppen til det føles stramt, men komfortabelt. IKKE blokker blodstrømmen.

3M Norge AS
Tærudgata 16, 2004 Lillestrøm
Tlf: 06384

