



# FUTURO™ KNIE-SPANGE ANPASSBAR

09189DABI

 MITTLERER  
STÜTZGRAD



ATMUNGSAKTIVES  
MATERIAL

Verwendungszweck: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Knien.

Zusammensetzung: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethanschäum, POM, Spandex, Polyethylen, Polypropylen.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

Übt gezielt Druck aus bei schmerzdem  
Springer- und Läuferknie.

**IDEAL FÜR:**

Tendinitis am Knie, Springerknie

**EIGENSCHAFTEN:**

- 1 Druckpelotte übt gezielten Druck auf schmerzende Sehnen aus.
  - 2 Dank Verstärkung bleibt die Pelotte bei Gebrauch in Form und flacht nicht ab.
  - 3 Verstellbarer Riemen für passgenauen Sitz.
- Dank geringem Gewicht für den täglichen Gebrauch geeignet.

**GRÖSSE:**

Artikelnummer	PZN	CM
09189DABI	4128470	31.8-44.5


Die Größe wird durch Messen des Unterschenkelumfangs unterhalb der Kniescheibe bestimmt.



**TRAGEANWEISUNG:**



Legen Sie die Spange knapp unterhalb des Knies an. Die Pelotte liegt direkt unter der Kniescheibe an der Haut an.

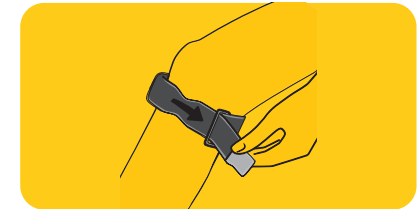

Führen Sie das Band durch die Schnalle und schließen Sie es.



Stellen Sie die Spange so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben. Schnüren Sie NICHT den Blutfluss ab.

3M Österreich GmbH  
Consumer Health Care, Euro Plaza, Gebäude J  
Kranichbergstrasse 4, 1120 Wien  
www.futuro.de

**3M**