



FUTURO™ SANGLE GENOU AJUSTABLE

09189



**MATÉRIAU
RESPIRANT**

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Polyester, Nylon, TPE, Polyurethane Foam, POM, Spandex, Polyethylene, Polypropylene
Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.
3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une pression ciblée en cas de douleur du genou, de syndrome rotulien.

INDIQUÉ POUR:

Tendinite du genou, tendinite du tendon patellaire

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Le coussinet central fournit une pression ciblée sur le tendon douloureux.
 - 2 Absence de compression ou d'aplatissement au cours de l'utilisation grâce à une conception renforcée du coussinet.
 - 3 Sangle réglable pour un ajustement sur mesure.
- Poids léger pour se faire oublier toute la journée.

TAILLES:


Category Number	cm
09189	31.8-44.5



MODE D'EMPLOI:



Entourez la sangle juste au-dessous du genou, en plaçant le coussinet de pression directement sous la rotule, contre la peau.

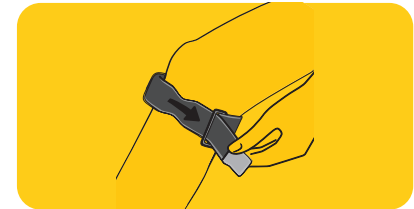

Engagez la sangle à travers la boucle, et faites adhérer la fixation.



Réglez la sangle jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable. Ne bloquez pas le flux sanguin.

3M France
Marché Bien Etre et Santé pour le Grand Public
Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise Cedex
542 078 555 RCS Pontoise

