



FUTURO™ POLVITUKINAUHA

09189



HENGITTÄVÄ
MATERIAALI

Käyttötarkoitus: Auttaa tukemaan jäykkää, heikkoa tai vahingoittunutta polvea.

Koostumus: polyesteri, nailon, TPE, polyuretaanivaahdot, POM, spandex, polyeteeni, polypropeeni.
Jos käyttö aiheuttaa tai lisää epämiellyttävää oloa tai kipua, lopeta käyttö ja ota yhteys lääkäriin.
3M ja FUTURO ovat 3M:n tuotemerkkejä.

**Muodostaa kohdistettua painetta
kipeään polveen (hyppääjän ja
juoksijan polvi).**

KÄYTTÖTARKOITUS:

Polven jännetulehdus, hyppääjän polvi

OMINAISUUDET:

- 1 Keskellä oleva pehmustetyyny kohdistaa painetta kipeään jänteeseen.
 - 2 Vahvistettu pehmustetyynymuotoilu ei puristu tai litisty käytössä.
 - 3 Säädettävä hihna takaa sopivan istuvuuden.
- Sopii päivittäiseen käyttöön.


KOKO:

Tuotekoodi	CM	
09189	31.8-44.5	

TUEN ASETTAMINEN:



Kiedo hihna aivan polven alapuolelta niin, että painetyyny on suoraan polvilumpion alapuolella ihoa vasten.

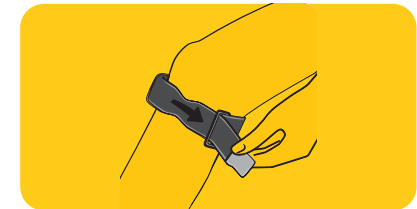

Vedä hihna soljen läpi, kiristä ja kiinnitä.



Säädä hihnaa, kunnes se asettuu lujasti mutta mukavasti. Älä kiristä liikaa, jotta verenkierto ei esty.

Suomen 3M Oy,
Keilaranta 6,
02150 ESPOO

