



# FUTURO™ AANPASBARE KNIERIEM

09189



ADEMEND  
MATERIAAL

Beoogd gebruik: Biedt steun voor stijve, zwakke knieën, of bij letsels.

Samenstelling: Polyester, Nylon, TPE, schuim, POM, Spandex, Polyethyleen, Polypropyleen.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er ongemak of pijn ontstaat, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

Biedt gerichte druk bij pijnlijke knieën  
of een springers- of lopersknie.

## IDEAAL VOOR:

Kniepeesontsteking, springersknie

## HOOFDKENMERKEN:


- 1 Het gecentreerde kussen biedt gerichte druk op de pijnlijke pees.
  - 2 Verstevigd kussen dat niet ingedrukt of platgedrukt wordt bij gebruik.
  - 3 Verstelbare riem voor een optimale pasvorm.
- Lichtgewicht voor draaggemak de hele dag door.

## MAAT:


Referentie	CNK	CM
09189	2716058	31.8-44.5




## DRAAGINSTRUCTIES:

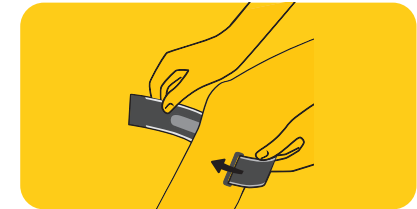

Wikkel de riem vlak onder de knie met het drukkussentje tegen de huid vlak onder de knieschijf.

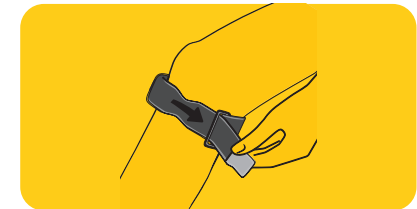

Trek de riem door de gesp en maak het klittenband vast.

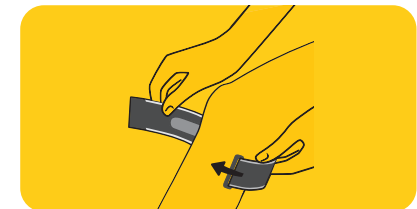

Verstel de riem totdat hij strak maar comfortabel vastzit. Zorg ervoor de bloedsomloop NIET te belemmeren.

3M Belgium bvba/sprl  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.  
Afd. Consumer Health Care  
www.3M.NL/futuro

