



FUTURO™ STØTTETROP TIL KNÆ

09189



ÅNDBART
MATERIALE

Tilsigtet anvendelse: Hjælper med at give støtte til stive, svage eller skadede knæ.

Materialesammensætning: Polyester, Nylon, Termoplastisk elastomer, Polyurethan skum, POM, Spandex, Polyethylen, Polypropylen.
Hvis du oplever smerter som følge af brug, og smerterne varer ved eller øges, skal du ophøre med brugen og søge læge.
3M og FUTURO er varemærker tilhørende 3M.

Giver et målrettet tryk på ømme
springer- og løberknæ.

VELEGNET TIL:

Senebetændelse i knæet, springerknæ

NØGLEFUNKTIONER:


- 1 Den centralt placerede pude giver et målrettet tryk på øm sene.
 - 2 Forstærket pudedesign, som ikke komprimeres eller bliver fladt under brug.
 - 3 Justerbar strop for brugertilpasset pasform.
- Let vægt til brug hele dagen.

STØRRELSESVALG:


Varenr	CM
212331	31.8-44.5



SÅDAN BRUGES DEN:

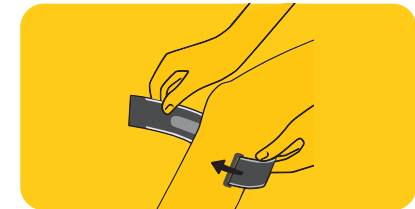

Før stroppen rundt om benet lige under knæet med trykuden imod huden lige under knæskallen.

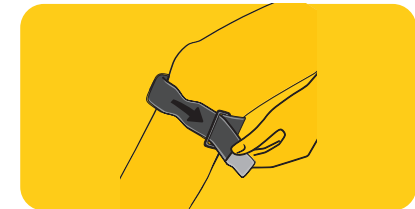

Stik den øverste strop igennem spændet, og sæt lukningen fast.



Juster stroppen, indtil den sidder til, men stadig føles behagelig. Du må IKKE hindre blodgennemstrømningen.

3M a/s
Hannemanns Allé 53
2300 København S
Denmark

