



# FUTURO™ SANGLE GENOU AJUSTABLE

09189



MATÉRIAU  
RESPIRANT

Utilisation prévue: Aide à soutenir un genou raide, faible ou blessé.

Composition: Polyester, Nylon, TPE, Mousse Polyuréthane, POM, Spandex, Polyéthylène, Polypropylène  
Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.  
3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

Fournit une pression ciblée en cas de douleur du genou, de syndrome rotulien.

## INDIQUÉ POUR:

Tendinite du genou, tendinite du tendon patellaire

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Le coussinet central fournit une pression ciblée sur le tendon douloureux.
  - 2 Absence de compression ou d'aplatissement au cours de l'utilisation grâce à une conception renforcée du coussinet.
  - 3 Sangle réglable pour un ajustement sur mesure.
- Poids léger pour se faire oublier toute la journée.

## TAILLES:


Référence	CNK	CM
09189	2716058	31.8-44.5



## MODE D'EMPLOI:



Entourez la sangle juste au-dessous du genou, en plaçant le coussinet de pression directement sous la rotule, contre la peau.

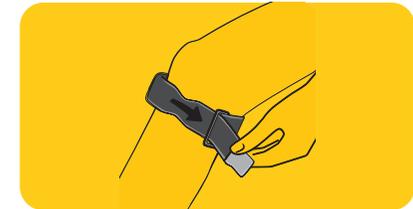

Engagez la sangle à travers la boucle, et faites adhérer la fixation.



Réglez la sangle jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable. Ne bloquez pas le flux sanguin.

3M Belgium bvba/sprl  
Dép. Consumer Health Care  
[www.3m.be/futuro-fr](http://www.3m.be/futuro-fr)

