



FUTURO™ HANDGELENK-BANDAGE ANPASSBAR MIT DAUMENSCHLAUFE

09033DABI

 MITTLERER
STÜTZGRAD



Einfaches Wickel-Design unterstützt das verletzte Handgelenk.

IDEAL GEEIGNET FÜR:

Allgemeine Unterstützung, bei sportlichen Aktivitäten

EIGENSCHAFTEN:

- ① Daumenschlaufe und umschließendes Design für eine einfache Handhabung.
- Anpassbarer Kompressionsgurt für passgenauen Sitz und Unterstützung.
- Neoprenmaterial für Komfort, Wärme und Halt.

GRÖSSE:

Artikelnummer	PHC	CM
09033DABI	5454007	11.4-24.1

Umfang des Handgelenks messen.



TRAGEANWEISUNG:



Stecken Sie den Daumen in die Schlaufe. Die glatte Seite des Materials zeigt zur Haut. Legen Sie die Bandage oben auf das Handgelenk.



Führen Sie die Bandage unter das Handgelenk und zurück auf das Handgelenk. Schließen Sie den Klettverschluss.



Stellen Sie die Bandage so ein, dass Sie ein festes, aber bequemes Tragegefühl haben.

Empfohlene Anwendungen: Bietet Unterstützung bei steifen, schwachen oder verletzten Handgelenken.

ACHTUNG: Manche Personen reagieren möglicherweise empfindlich auf Neopren oder Neopren-Gummimischungen. Falls Hautreizungen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

Zusammensetzung: Neopren, Nylon, Polyester.

Falls Unbehagen oder Schmerzen auftreten, anhalten oder stärker werden, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und suchen Sie einen Arzt auf.

3M und FUTURO sind Handelsmarken von 3M.

3M (Schweiz) GmbH
Consumer Health Care
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
www.3mschweiz.ch/futuro

