

FUTURO™ **BANDAGE POIGNET AJUSTABLE**

09033





La forme enveloppante procure soutien au poignet blessé.

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités sportives

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- 1 Emplacement pour le pouce et forme design, pour une mise en place facile.
- Sangle de compression réglable pour un ajustement et un soutien personnalisés.
- Matériau en mélange néoprène pour confort, chaleur et soutien.

TAILLES:

Référence	PHC	СМ
09033	5454007	11.4-24.1

Mesurer le tour du poignet.



MODE D'EMPLOI:



Insérez le pouce dans la boucle avec le côté lisse du matériau face à la peau. Enroulez le support sur le dessus du poignet.



Placez le support sous le poignet et ramenezle autour du haut du poignet. Fixez l'attache à crochets.



Réglez le support jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

3M (Suisse) S.à r.l. Consumer Health Care Eggstrasse 93 8803 Rüschlikon www.3msuisse.ch/futuro



AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc. En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Néoprène, Nylon, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin. 3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

