



FUTURO™ AANPASBARE POLSBANDAGE

09033

 MATIGE
STEUN



Handig wikkelontwerp dat de
geblesseerde pols ondersteunt.

IDEAAL VOOR:

Algemene ondersteuning, sportactiviteiten

HOOFDKENMERKEN:

- ① Duimlus en wikkelontwerp voor eenvoudig aantrekken.
- Verstelbare compressieband voor een goede pasvorm en ondersteuning.
- Neopreenmix, voor comfort, warmte en ondersteuning.

MAAT:

Referentie	CNK	CM
09033	2716066	11.4-24.1

Meet de omtrek van de pols.



DRAAGINSTRUCTIES:



Steek een duim in de lus met de gladde kant van het materiaal naar de huid gericht. Wikkel de band om de bovenkant van de pols.



Breng de band onder de pols en terug naar de bovenkant van de pols. Zet hem vast met het klittenband.



Verstel het klittenband totdat het strak maar comfortabel zit.

Beoogd gebruik: Ondersteunt een stijve, zwakke of geblesseerde pols.

LET OP: Sommige mensen zijn gevoelig voor neopreen of neopreen-rubbermengsels. Stop het gebruik en raadpleeg een arts als er uitslag ontstaat.

Samenstelling: Neopreen, Nylon, Polyester.

Stop het gebruik en raadpleeg een arts bij ongemak of pijn, of als de pijn/het ongemak aanhoudt of verergert.

3M en FUTURO zijn handelsmerken van 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Afd. Consumer Health Care
www.3M.BE/futuro

3M Nederland B.V.
Afd. Consumer Health Care
www.3M.NL/futuro

3M