



FUTURO™ BANDAGE POIGNET AJUSTABLE

09033

 SOUTIEN
MODÉRÉ



La forme enveloppante procure soutien au poignet blessé.

INDIQUÉ POUR:

Soutien général, activités sportives

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- ① Emplacement pour le pouce et forme design, pour une mise en place facile.
- Sangle de compression réglable pour un ajustement et un soutien personnalisés.
- Matériau en mélange néoprène pour confort, chaleur et soutien.

TAILLES:

Référence	CNK	CM
09033	2716066	11.4-24.1

Mesurer le tour du poignet.



MODE D'EMPLOI:



Insérez le pouce dans la boucle avec le côté lisse du matériau face à la peau. Enroulez le support sur le dessus du poignet.



Placez le support sous le poignet et ramenez-le autour du haut du poignet. Fixez l'attache à crochets.



Réglez le support jusqu'à ce que l'ajustement soit ferme, mais confortable.

Utilisation prévue: Pour soutenir un poignet raide, faible ou blessé.

AVERTISSEMENT: Certaines personnes peuvent être sensibles au néoprène ou au mélange néoprène-caoutchouc.

En cas d'éruption cutanée, interrompre l'utilisation et consulter un médecin.

Composition: Néoprène, Nylon, Polyester.

Si une gêne ou une douleur survient, persiste ou augmente, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

3M et FUTURO sont des marques déposées de 3M.

3M Belgium bvba/sprl
Dép. Consumer Health Care
www.3m.be/futuro-fr

3M